

只需一次血液检查即可筛查多种癌症。

Galleri[®]检测可筛查癌症信号并预测与该信号相关联的组织类型或器官。



Galleri多种癌症早期检测为同类产品中的首款产品

- 筛查50多种癌症的共有信号，包括快速扩散，而且在早期不会表现出症状的侵略性癌症，如胰腺癌和卵巢癌。
- 寻找与活动性癌症相关联的信号，但并不能预测您未来的癌症遗传风险。

Galleri检测并不能检测出所有癌症的信号，而且并非所有癌症都能在血液中检测出来。Galleri检测有时会出现假阳性和假阴性结果。

只有5种癌症建议进行筛查检测



将Galleri检测纳入您的癌症筛查


可以增加您早期发现癌症相关信号的机会。

Galleri检测不能取代您的医疗保健提供者推荐的其他筛查检测。

Galleri检测适用于哪些人群？

年龄是癌症的最大风险因素

50岁及以上的人罹患癌症的可能性比50岁以下的人高**13倍**。

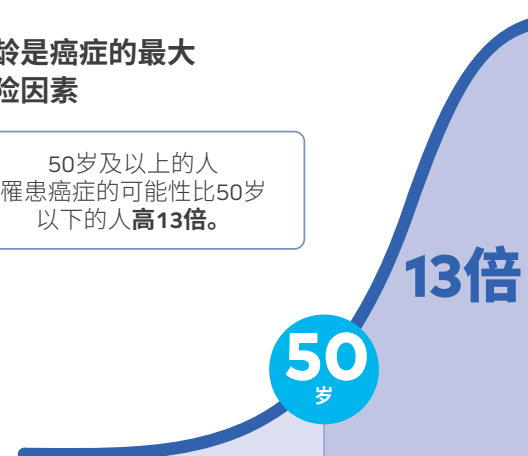

建议将该检测用于癌症风险较高的成年人，例如50岁或以上的人。

无症状人士可以接受检测。

您的医疗保健提供者可以确定本检测是否适合您。

检测的工作原理



检测过程

- 1 申请检测**
通过您的医疗保健提供者，检测需开具处方
- 2 完成抽血**
在您的医疗保健提供者的诊所或实验室
- 3 收到您的检测结果**
在GRAIL实验室收到您的样品后2周左右



使用“检测到癌症信号”检测结果 诊断的癌症类型

经过大型临床研究的评估，Galleri检测检测到了50多种癌症的共有信号。

- 肾上腺皮质癌
- 壶腹
- 肛门
- 阑尾癌
- 远端胆管
- 肝内胆管
- 门周胆管
- 膀胱，泌尿系统
- 骨
- 乳腺
- 宫颈
- 结肠和直肠
- 食管和食管胃交界部
- 胆囊
- 胃肠道间质瘤
- 妊娠滋养细胞肿瘤
- 肾脏
- 喉
- 白血病
- 肝
- 肺
- 淋巴瘤(霍奇金和非霍奇金)
- 皮肤黑色素瘤
- 默克尔细胞癌
- 间皮瘤，恶性胸膜
- 鼻腔和副鼻窦
- 鼻咽
- 阑尾神经内分泌肿瘤
- 结肠和直肠神经内分泌肿瘤
- 胰腺神经内分泌肿瘤
- 口腔
- 口咽 (HPV介导的, p16+)
- 口咽(p16-)和下咽部
- 卵巢、输卵管和原发性腹膜
- 胰腺，外分泌
- 阴茎
- 浆细胞骨髓瘤和浆细胞疾病
- 前列腺
- 小肠
- 腹部和胸腔内脏器官软组织肉瘤
- 头颈部软组织肉瘤
- 腹膜后软组织肉瘤
- 躯干和四肢软组织肉瘤
- 不寻常组织学部位的软组织肉瘤
- 胃
- 睾丸
- 输尿管，肾盂
- 子宫，癌和癌肉瘤
- 子宫，肉瘤
- 阴道
- 外阴

理解检测结果

有两种可能的检测结果。

✓ 未检测到癌症信号

这意味着没有在血样中发现癌症信号。本检测并不能检测出所有癌症，而且并非所有癌症都能在血液中检测出来。这一结果并不能完全排除癌症的可能性。**下一步行动：**继续进行医疗保健提供者推荐的常规癌症筛查。将Galleri检测纳入年度健康检查，可以提高您早期发现癌症的机会。咨询您的医疗保健提供者，了解复查的最佳时机。

! 检测到癌症信号

这意味着在血样中发现了癌症信号。结果中包括1或2个与该信号相关的组织类型或器官的预测，称为“**癌症信号起源**”。**下一步行动：**这个结果并不代表癌症诊断，需要进行后续的诊断检测，这可能包括由您的医疗保健提供者要求进行的化验或影像学检查。

了解更多关于结果的信息：[Galleri.com/results](https://galleri.com/results)

Galleri检测有时会出现假阳性和假阴性结果。

付款方案

大多数健康保险计划不承保Galleri检测费用。请向您的医疗保健提供者询问费用价格。

您可能可以使用灵活开支账户(Flexible spending account, FSA)或健康储蓄账户(Health savings account, HSA)中的税前资金来支付Galleri检测费用。请与您的FSA或HSA管理人或保险提供商核实，确定是否符合资格。

重要安全提示

建议将Galleri检测用于癌症风险较高的成年人，例如50岁或以上的人。Galleri检测并不能检测出所有癌症，应与医疗保健提供者建议的常规癌症筛查项目一同使用。Galleri检测旨在检测癌症信号并预测癌症信号在体内的位置。不建议孕妇、21岁或以下或正在接受活动性癌症治疗的人士使用Galleri检测。检测结果应由医疗保健提供者根据病史、临床症状和体征进行解读。如果检测结果显示“未检测到癌症信号”，并不排除癌症。如果检测结果显示“检测到癌症信号”，则需要通过医学上认可的程序（例如成像）进行确认性诊断评估以确认癌症。如果进一步检测后无法确认癌症，则可能意味着不存在癌症或检测不足以检测到癌症，包括癌症位于身体另一部位的情况。有时会出现假阳性（当癌症不存在时检测到癌症信号）和假阴性（当癌症存在时未检测到癌症信号）检测结果。**仅凭处方使用。**

实验室/检测信息

Galleri检测由执行检测的经CLIA认证和CAP认可的GRAIL临床实验室研发并确定检测的性能特征。Galleri检测尚未得到美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)的批准或认可。

要咨询更多问题？

请访问[Galleri.com/patient/faqs](https://galleri.com/patient/faqs)



联系电子邮箱

customerservice@grail.com



833-MY-GALLERI

(833-694-2553)