

只需一次血液检查即可筛查多种癌症。

Galleri[®]检测可以在多种最致命的癌症出现症状之前就筛查出这些癌症。



越早发现癌症等健康问题，就能越早采取行动。

- Galleri检测可以筛查出多种最致命的癌症，包括目前没有建议进行筛查检测的癌症。
- 寻找血液样本中癌细胞脱落的DNA，但无法预测您将来患癌症的风险。

Galleri检测并不能检测出所有癌症的信号，而且并非所有癌症都能在血液中检测出来。Galleri检测有时会出现假阳性和假阴性结果。Galleri检测应作为对医疗保健提供者推荐的筛查检测的补充。

只有五种癌症建议进行筛查检测




将Galleri检测纳入您的癌症筛查
可以增加早期发现癌症的机会。

Galleri检测不能取代您的医疗保健提供者推荐的其他筛查检测。

Galleri检测适用于哪些人群？

年龄是癌症的最大风险因素

50岁及以上的人罹患癌症的可能性比50岁以下的人**高13倍**。

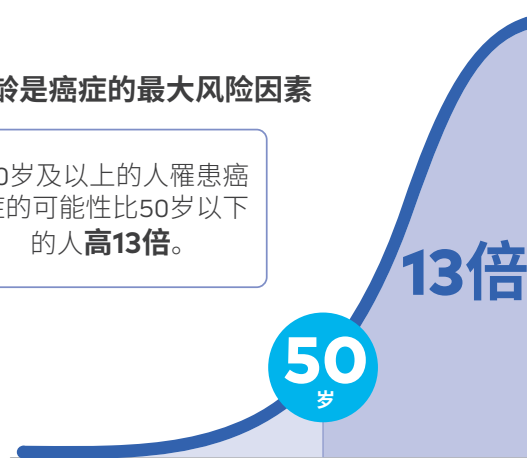


建议将该检测用于癌症风险较高的成年人，例如50岁或以上的人。

无症状人士可以接受检测。

您的医疗保健提供者可以确定本检测是否适合您。

检测的工作原理

Galleri®检测会筛查您的血液样本（两管血液）并识别生长中的癌细胞脱落到血液中的DNA片段。

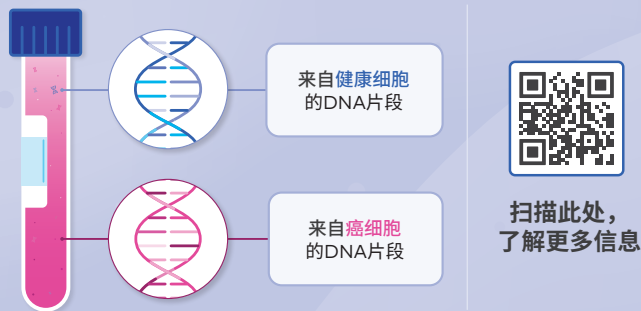

尽管癌症有许多种类型，但DNA片段具有常与癌症相关的独特“模式”。

Galleri检测筛查什么？

一项大型临床研究评估表明，Galleri检测筛查出50多种癌症的共有信号。

这50多种癌症中包括12种恶性癌症，占癌症死亡人数的三分之二。恶性癌症会脱落更多的DNA，并且更有可能出现“检测到癌症信号”的结果。

- 肛门
- 膀胱
- 结肠/直肠
- 食管
- 头颈部
- 肝脏/胆管
- 肺
- 淋巴瘤
- 卵巢
- 胰腺
- 浆细胞肿瘤
- 胃
- 肾上腺皮质癌
- 壶腹
- 阑尾癌
- 远端胆管
- 肝内胆管
- 门周胆管
- 骨
- 乳腺
- 宫颈
- 胆囊
- 胃肠道间质瘤
- 妊娠滋养细胞肿瘤
- 肾脏
- 喉
- 白血病
- 皮肤黑色素瘤
- 默克尔细胞癌
- 恶性胸膜间皮瘤
- 鼻腔和副鼻窦
- 鼻咽
- 阑尾神经内分泌肿瘤
- 结肠和直肠神经内分泌肿瘤
- 胰腺神经内分泌肿瘤
- 口腔
- 口咽 (HPV介导, p16+)
- 口咽 (p16-) 和下咽部
- 阴茎
- 前列腺
- 小肠
- 腹部和胸腔内脏器官软组织肉瘤
- 腹膜后软组织肉瘤
- 躯干和四肢软组织肉瘤
- 不寻常组织学和部位的软组织肉瘤
- 睾丸
- 输尿管, 肾盂
- 子宫癌和癌肉瘤
- 子宫肉瘤
- 阴道
- 外阴

敏感性随癌症类型和阶段而异。

有关更多信息，请访问：[Galleri.com/test-report](https://www.grail.com/test-report)

重要安全信息：建议将Galleri检测用于癌症风险较高的成年人，例如50岁或以上的人。Galleri检测并不能检测出所有癌症，应与医疗保健提供者建议的常规癌症筛查项目一同使用。Galleri检测旨在检测癌症信号并预测癌症信号在体内的位置。不建议在怀孕、21岁或以下或正在接受积极癌症治疗的人中使用Galleri检测。医疗保健提供者应根据病史以及临床症状和体征来解释结果。如果检测结果显示“未检测到癌症信号”，并不排除癌症。如果检测结果显示“检测到癌症信号”，则需要通过医学上认可的程序（例如成像）进行确认性诊断评估以确认癌症。如果进一步检测后无法确认癌症，则可能意味着不存在癌症或检测不足以检测到癌症，包括癌症位于身体另一部位的情况。有时会出现假阳性（当癌症不存在时检测到癌症信号）和假阴性（当癌症存在时未检测到癌症信号）检测结果。**仅凭处方使用。**

实验室/检测信息：GRAIL临床实验室根据1988年临床实验室改进修正案（CLIA）认证，并获得美国病理学家学院认可。Galleri检测由GRAIL开发并确定其性能特征。Galleri检测尚未得到美国食品和药物管理局（FDA）的批准或认可。GRAIL临床实验室受CLIA监管，可执行高复杂性检测。Galleri检测旨在用于临床目的。

检测过程

1 申请检测
通过您的医疗保健提供者，检测需开具处方



2 完成抽血
在您的医疗保健提供者的诊所或实验室



3 收到您的检测结果
GRAIL实验室收到您的血液样本后2周左右



理解检测结果

有两种可能的检测结果。

✓ 未检测到癌症信号

该结果意味着在血液样本中未发现与癌症相关的DNA片段。该检测并不能检测出所有癌症，而且并非所有癌症都能在血液中检测出来。该结果并不能完全排除癌症的可能性。临床研究表明，出现该结果的人不太可能患有癌症。事实上，在出现该结果的人中，每100人中只有不到2人被确诊患有癌症。

下一步行动：继续进行医疗保健提供者推荐的常规癌症筛查。

在年度健康检查中，将Galleri检测纳入推荐的筛查检测，可以提高您早期发现癌症的机会。咨询您的医疗保健提供者，了解复查的最佳时机。

! 检测到癌症信号

该结果意味着在血液样本中发现了与癌症相关的DNA片段。该结果还包括与癌症信号相关的组织类型或器官的预测，称为**癌症信号起源**。

下一步行动：这个结果并不代表癌症诊断，需要进行后续的诊断检测，这可能包括由您的医疗保健提供者要求进行的化验或影像学检查。

了解更多关于结果的信息：[Galleri.com/results](https://www.grail.com/results)

付款方案

大多数健康保险计划不承保Galleri检测费用。您可能可以使用灵活开支账户(Flexible spending account, FSA)或健康储蓄账户(Health savings account, HSA)中的税前资金来支付Galleri检测费用。请与您的FSA或HSA管理人或保险提供商核实，确定是否符合资格。

要咨询更多问题？

请访问[Galleri.com/patient/faqs](https://www.grail.com/patient/faqs)



联系电子邮箱

customerservice@grail.com



833-MY-GALLERI

(833-694-2553)