

Tầm soát đa ung thư bằng một xét nghiệm máu duy nhất.

Xét nghiệm Galleri[®] tầm soát nhiều loại ung thư nguy hiểm nhất trước khi xuất hiện các triệu chứng.



Bạn phát hiện các vấn đề về sức khỏe như ung thư càng sớm thì bạn có thể hành động càng sớm

- Xét nghiệm Galleri tầm soát nhiều bệnh ung thư gây tử vong cao nhất, bao gồm các loại hiện nay chưa có xét nghiệm tầm soát được khuyến nghị.
- Tìm kiếm DNA do tế bào ung thư giải phóng trong mẫu máu và không đưa ra dự đoán về nguy cơ mắc bệnh ung thư trong tương lai.

Xét nghiệm Galleri không phát hiện dấu hiệu của tất cả các loại ung thư và không phải tất cả các loại ung thư đều có thể phát hiện thấy trong máu. Vẫn xảy ra kết quả dương tính giả và âm tính giả. Nên dùng Galleri để bổ sung cho các xét nghiệm tầm soát được nhân viên y tế khuyến nghị.

Chỉ có 5 loại ung thư có xét nghiệm tầm soát được khuyến nghị



Việc thêm Galleri vào các xét nghiệm tầm soát ung thư có thể tăng cơ hội phát hiện ung thư sớm.

Galleri không thay thế các xét nghiệm tầm soát khác mà nhân viên y tế khuyến nghị bạn thực hiện.

Galleri phù hợp cho ai?

Tuổi tác là yếu tố nguy cơ ung thư lớn nhất

Những người từ 50 tuổi trở lên có khả năng mắc bệnh ung thư cao gấp 13 lần so với những người dưới 50 tuổi.




Được khuyến nghị sử dụng cho người lớn có nguy cơ ung thư cao chẳng hạn như những người từ 50 tuổi trở lên.

Những người không có triệu chứng có thể làm xét nghiệm.

Nhân viên y tế có thể xác định liệu xét nghiệm này có phù hợp với bạn hay không.

Cách thức hoạt động của xét nghiệm

Xét nghiệm Galleri® tầm soát mẫu máu của bạn (2 ống máu) và xác định các đoạn DNA do bệnh ung thư phát triển giải phóng vào máu.

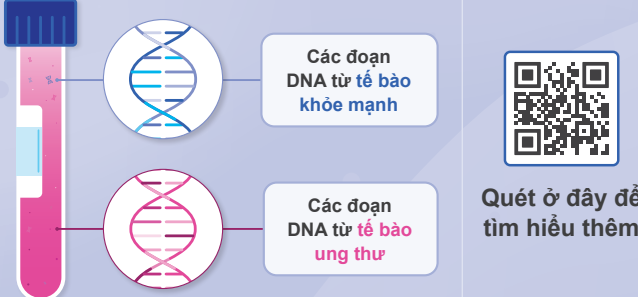

Các đoạn DNA từ tế bào khỏe mạnh

Các đoạn DNA từ tế bào ung thư

Quét ở đây để tìm hiểu thêm

Mặc dù có nhiều loại ung thư khác nhau, nhưng các đoạn DNA này đóng vai trò như một khuôn mẫu duy nhất thường liên quan đến ung thư.

Quy trình xét nghiệm

- 1 Yêu cầu xét nghiệm**
Thông qua nhân viên y tế; cần được kê toa 
- 2 Hoàn thành việc lấy máu**
Tại phòng mạch hoặc phòng xét nghiệm của nhân viên y tế 
- 3 Nhận kết quả xét nghiệm**
Khoảng 2 tuần sau khi phòng thí nghiệm GRAIL nhận được mẫu máu của bạn 

Xét nghiệm Galleri tầm soát những gì

Được đánh giá trong một nghiên cứu lâm sàng lớn, xét nghiệm Galleri đã sàng lọc dấu hiệu chung có ở hơn 50 loại ung thư.

Trong số hơn 50 loại ung thư này có 12 loại ung thư tăng triển nhanh, gây ra 2/3 số ca tử vong do ung thư. Các loại ung thư tăng triển nhanh giải phóng nhiều DNA hơn và có nhiều khả năng hơn trong việc đem lại kết quả xét nghiệm là Phát hiện thấy Dấu hiệu Ung thư.

- Hậu môn
- Bàng quang
- Đại tràng/trực tràng
- Thực quản
- Đầu và cổ
- Gan/ống dẫn mật
- Ung thư biểu mô vòm thượng thận
- Bóng Vater
- Ruột thừa, ung thư biểu mô
- Ống dẫn mật, ngoài gan
- Ống dẫn mật, trong gan
- Ống dẫn mật, vùng rốn gan
- Xương
- Vú
- Cổ tử cung
- Túi mật
- U mô đệm đường tiêu hóa
- U nguyên bào nuôi thai kỳ
- Thận
- Thanh quản
- Ung thư Bạch cầu
- Tế bào hắc tố da
- Ung thư biểu mô tế bào Merkel
- U trung biểu mô, màng phổi ác tính
- Khoang mũi & các xoang cạnh mũi
- Mũi hầu
- U thần kinh nội tiết ruột thừa
- U thần kinh nội tiết đại trực tràng
- Phổi
- U lympho
- Buồng trứng
- Tuyến tụy
- Ung thư tế bào plasma
- Bụng
- U thần kinh nội tiết tuyến tụy
- Khoang miệng
- Hầu họng (qua trung gian HPV, p16+)
- Hầu họng (p16-) & hạ hầu
- Dương vật
- Tuyến tiền liệt
- Ruột non
- Sarcoma mô mềm ở bụng & cơ quan nội tạng trong lồng ngực
- Sarcoma mô mềm khoang sau phúc mạc
- Sarcoma mô mềm ở thân & tứ chi
- Sarcoma mô mềm mô & vị trí bất thường
- Tinh hoàn
- Niệu quản, bễ thận
- Tử cung, ung thư biểu mô & ung thư biểu mô tuyến sợi
- Tử cung, sarcoma
- Âm đạo
- Âm hộ

Độ nhạy khác nhau tùy theo loại và giai đoạn ung thư. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: [Galleri.com/test-report](https://www.grail.com/test-report)

Thông tin An toàn Quan trọng: Xét nghiệm Galleri được khuyến nghị sử dụng cho người lớn có nguy cơ bị ung thư cao, chẳng hạn như những người từ 50 tuổi trở lên. Xét nghiệm Galleri không phát hiện tất cả các loại ung thư và cần được sử dụng để bổ sung cho các xét nghiệm tầm soát ung thư thường quy được nhân viên y tế khuyến nghị. Galleri được thiết kế để phát hiện các dấu hiệu ung thư và dự báo vị trí của dấu hiệu ung thư trong cơ thể. Không khuyến nghị sử dụng Galleri ở người đang mang thai, 21 tuổi trở xuống hoặc đang điều trị ung thư tích cực. Nhân viên y tế cần diễn giải kết quả kết hợp bối cảnh bệnh sử, các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng. Kết quả xét nghiệm Không Phát hiện thấy Dấu hiệu Ung thư không loại trừ ung thư. Kết quả xét nghiệm Phát hiện thấy Dấu hiệu Ung thư yêu cầu phải đánh giá chẩn đoán xác nhận bằng các quy trình y tế đã được thiết lập (ví dụ: chẩn đoán hình ảnh) để xác nhận ung thư. Nếu xét nghiệm bổ sung không xác nhận ung thư, điều đó có thể đồng nghĩa với việc không có ung thư hoặc xét nghiệm không đủ để phát hiện ung thư, bao gồm lý do ung thư nằm ở một bộ phận khác của cơ thể. Kết quả xét nghiệm dương tính giả (phát hiện thấy dấu hiệu ung thư khi không có ung thư) và âm tính giả (không phát hiện dấu hiệu ung thư khi có ung thư) vẫn xảy ra. **Chỉ sử dụng theo toa.**

Thông tin Phòng thí nghiệm/Xét nghiệm: Phòng thí nghiệm lâm sàng GRAIL được chứng nhận theo Bản sửa đổi Cải tiến Phòng thí nghiệm Lâm sàng năm 1988 (Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) và được công nhận bởi Hiệp hội Bác sĩ giải phẫu bệnh Hoa Kỳ. GRAIL đã phát triển và xác định các đặc tính hiệu suất của xét nghiệm Galleri. Xét nghiệm Galleri chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thông qua hay phê duyệt. Phòng thí nghiệm lâm sàng GRAIL được quản lý theo quy định của CLIA để thực hiện xét nghiệm có độ phức tạp cao. Xét nghiệm Galleri được thiết kế cho mục đích lâm sàng.

Hiểu kết quả

Có thể có hai kết quả xét nghiệm.

✓ Không Phát hiện thấy Dấu hiệu Ung thư

Kết quả này có nghĩa là các đoạn DNA liên quan đến ung thư không được tìm thấy trong mẫu máu. Xét nghiệm này không phát hiện ra tất cả các loại ung thư và không phải tất cả các loại ung thư đều có thể phát hiện thấy trong máu. Kết quả này không loại trừ hoàn toàn khả năng mắc ung thư. Dựa trên một nghiên cứu lâm sàng, những người có kết quả này ít có khả năng mắc ung thư. Trên thực tế, chưa đến 2 người trong số 100 người có kết quả này được chẩn đoán mắc ung thư. **Bước tiếp theo:** Tiếp tục thực hiện tầm soát ung thư thường quy mà nhân viên y tế khuyến nghị bạn thực hiện.

Việc thêm Galleri vào xét nghiệm tầm soát được khuyến nghị trong các lần khám sức khỏe hàng năm có thể tăng cơ hội phát hiện ung thư sớm. Hãy hỏi nhân viên y tế về thời điểm thích hợp nhất để làm xét nghiệm lại.

! Phát hiện thấy Dấu hiệu Ung thư

Kết quả này có nghĩa là các đoạn DNA thường liên quan đến ung thư được tìm thấy trong mẫu máu. Kết quả này cũng sẽ bao gồm dự đoán về loại mô hoặc cơ quan liên quan đến dấu hiệu ung thư này, được gọi là **Nguồn gốc của Dấu hiệu Ung thư**. **Bước tiếp theo:** Kết quả này không phải là một chẩn đoán ung thư và cần xét nghiệm chẩn đoán theo dõi, các xét nghiệm này có thể bao gồm xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh do nhân viên y tế chỉ định để xác nhận ung thư.

Tìm hiểu thêm về kết quả: [Galleri.com/results](https://www.grail.com/results)

Các lựa chọn thanh toán

Hầu hết các chương trình bảo hiểm y tế không đài thọ chi phí xét nghiệm Galleri. Bạn có thể sử dụng số tiền trước thuế trong tài khoản chi tiêu linh hoạt (flexible spending account, FSA) hoặc tài khoản tiết kiệm y tế (health savings account, HSA) để thanh toán cho xét nghiệm Galleri. Hãy tham khảo ý kiến từ người quản trị FSA hoặc HSA hoặc nhân viên y tế để xác định xem xét nghiệm có đủ điều kiện để được thanh toán không.

Bạn vẫn còn câu hỏi?

Hãy truy cập [Galleri.com/patient/faqs](https://www.grail.com/patient/faqs)



Gửi email cho Chúng tôi
customerservice@grail.com



833-MY-GALLERI
(833-694-2553)